

	DESINFECTION DISPOSITIFS MEDICAUX ET ENVIRONNEMENT DU PATIENT	
Mode opérateur	MO VIG DES 014	Version 9
Siège social : 31 Boulevard des Alpes CS 30029 - 38242 MEYLAN CEDEX - Tél.: 04 38 38 01 38		1/4

Libellé	Objet de la modification
Version Août 2021	
Ajout du nouveau produit OPTISAL PLUS	
Version Octobre 2020	
Contenu	Ajout d'éléments concernant la désinfection surfaces et mobiliers

OBJET :

Ce mode opératoire décrit les modalités de désinfection des dispositifs médicaux et petits matériels non stériles utilisés en Dialyse.

Il précise les modes d'utilisation des produits de désinfection utilisés :

ANIOSYME : Produit détergent-désinfectant pour la pré-désinfection du matériel et des instruments.

OPTISAL PLUS : Produit détergent désinfectant pour générateurs et matériel médical.

ANIOSURF : Produit détergent désinfectant pour sols et surfaces.

DOMAINE D'APPLICATION :

Tout l'AGDUC.

DESTINATAIRES :

IDE, AS, AH

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :

- Surveiller et prévenir les infections associées aux soins / SFHH / Septembre 2010
- Circulaire DGS/DH n°98-249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé
- Guide pour le choix des désinfections / SFHH 2015
- Actualisations des précautions standard SFHH Juin 2017

DOCUMENTS LIES :

FT VIG DES 001 - Utilisation d' OPTISAL PLUS

Rédigé par :	Contrôlé par :	Validé par :	Approuvé par :	Date de diffusion :
IDE hygiénistes	Mme G. BAUDUIN Ingénieur qualité	Dr N. MINGAT Président de l'EOH / CLIN	M. P. MARECHAL Directeur Général	08/2021
Visa	Visa	Visa	Visa	

Mode opératoire	DESINFECTION DISPOSITIFS MEDICAUX ET ENVIRONNEMENT DU PATIENT	
Version 9	MO VIG DES 014	2/4

TERMINOLOGIE :

Dispositifs médicaux : Générateurs, pousse-seringues et autres matériels utilisés durant la séance de dialyse

Environnement du patient : Adaptables, potence, tous pieds roulants, lits, sonnettes, poignées de porte, frigo de pharmacie, tiroirs Herman Miller, télécommandes, commandes de lits, écouteurs, chariot de soins, tablettes, matelas, encadrements lits, pèse-personnes, chaises, oreillers...

Instrumentation médicale et Petits matériels : Clamps, ciseaux, brassards, lunettes,...

Pré-désinfection : Opération au résultat momentané, permettant d'éliminer, de tuer ou d'inhiber les micro-organismes indésirables. C'est le premier traitement à effectuer sur les objets et matériels souillés par des micro-organismes et de faciliter le nettoyage ultérieur, afin de protéger le personnel et d'éviter la contamination de l'environnement.

Nettoyage : Opération suivant la pré-désinfection et utilisant une technique et des moyens mécaniques visant à éliminer les salissures du matériel devant être désinfecté.

Désinfection : Opération au résultat momentané, permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes indésirables. Cette opération est pratiquée après nettoyage sur un matériel qui ne subit pas de stérilisation.

CONTENU :

➤ DESINFECTION PETIT MATÉRIEL

Le produit choisi pour l'instrumentation médicale (trempage) est l'Aniosyme.

Ce produit doit être préparé chaque matin en diluant un sachet de 25ml dans 5l d'eau (froide) avec les précautions suivantes :

Précautions particulières :

- **Porter gants** (Nitrile conseillé), **masques et lunettes de protection lors des manipulations**
- **Conserver dans un bac couvert** (produit à changer chaque jour)
- **Ne pas mélanger à d'autres produits**
- **Bien rincer les objets après trempage**

Dans deux bacs n°1 et n°2 identifiés qui permettront les deux phases de pré-désinfection et de désinfection

1 / Pré-désinfection dans bac N°1:

Elle précède le nettoyage et la désinfection. Elle s'effectue après utilisation pour le petit matériel de soin qui n'est pas stérilisé (clamps, brassards si présence de liquides biologiques). Dès la fin de l'utilisation, placer les instruments ouverts dans le bac de trempage contenant la solution de détergent désinfectant. Cette préparation se conserve maximum **48 heures**.

⇒ **LAISSER TREMPER LE MATERIEL 15 MINUTES**

Mode opératoire	DESINFECTION DISPOSITIFS MEDICAUX ET ENVIRONNEMENT DU PATIENT	
Version 9	MO VIG DES 014	4/4

➔ DÉSINFECTION SURFACES ET MOBILIERS

Le produit choisi pour la désinfection des générateurs ainsi que pour le matériel médical (pousse seringue...) est OPTISAL PLUS

➔ **Diluer une dose de 20 ml de produit dans 2 litres d'eau froide ou tiède**
(utiliser le pot doseur fourni)

➔ Verser le mélange (eau et OPTISAL) sur le rouleau neuf de lingettes qui aura été placé préalablement dans le pot (ne pas oublier de nettoyer l'intérieur et l'extérieur du pot à chaque préparation d'un nouveau rouleau de lingettes).

➔ **Pour un seau de 90 lingettes : verser 1L7 de cette dilution sur le rouleau.**

➔ **Pour un seau de 30 lingettes : verser 600 cc de cette dilution.**

➔ Laisser les chiffonnettes s'imprégner pendant 30 minutes (minimum).

➔ Les lingettes doivent être juste humides et non dégoulinantes.

➔ Chaque rouleau de lingettes est muni d'une étiquette qui doit être utilisée pour noter la date de préparation du produit (durée de conservation 28 jours).

**Pour effectuer cette préparation, s'installer dans une pièce ventilée (local sale).
Porter les EPI suivants : sur blouse, lunettes de protection, masque, gants.
Ne pas mélanger à d'autres produits.
Intégrer le rouleau de lingettes avec précaution.
Noter date de mise en place du pot de lingettes (durée maximale 28 jours).**

Rappel :

- Nettoyer l'extérieur du pot de lingettes avec son couvercle chaque soir à l'aide d'une lingette et bien refermer le pot entre deux utilisations.

REVISIONS ET MODIFICATIONS :

Version 1 : Rédigée le 28/02/2003 par correspondants EOH, CHSCT, IDE hygiéniste, Responsable qualité

Version 2 : Révisée en Juin 2008 par IDE hygiéniste et Responsable qualité

Version 3 : Révisée en Août 2011 par IDE hygiéniste et Responsable bionettoyage

Version 4 : Révisée en Août 2013 par IDE hygiéniste et Responsable bionettoyage

Version 5 : Révisée en Juillet 2015 par IDE hygiéniste

Version 6 : Révisée en Septembre 2016 par IDE hygiéniste

Version 7 : Révisée en Novembre 2017 par IDE hygiéniste

Version 8 : Révisée en Octobre 2020 par IDE hygiénistes

Version 9 : Révisée en Août 2021 par IDE hygiénistes