

	UTILISATION OPTISAL PLUS	
Fiche technique	FT VIG DES 001	Version 1
Siège social : 31Boulevard des Alpes CS 30029 - 38242 MEYLAN CEDEX - Tél. : 04 38 38 01 38		1/2



Dilution de OPTISAL PLUS pour le seau à lingettes qui remplacera le Cleanisept.

Réservé et nécessaire au nettoyage et à la désinfection des surfaces en contact avec le patient ainsi que du matériel biomédical (générateurs, pompes à perfusion, moniteurs de PA...).

➡ Bien respecter les doses de produit soit :

➡ **Diluer une dose de 20 ml de produit dans 2 litres d'eau froide ou tiède** (utiliser le pot doseur fourni)

➡ Verser le mélange (eau et OPTISAL PLUS) sur le rouleau neuf de lingettes qui aura été placé préalablement dans le pot (ne pas oublier de nettoyer l'intérieur et l'extérieur du pot à chaque préparation d'un nouveau rouleau de lingettes).

➡ **Pour un seau de 90 lingettes : verser 1L7 de cette dilution sur le rouleau.**

➡ **Pour un seau de 30 lingettes : verser 600 cc de cette dilution.**

➡ Laisser les chiffonnettes s'imprégner pendant 30 minutes (minimum).

➡ Les lingettes doivent être juste humides et non dégoulinantes.

➡ Chaque rouleau de lingettes est muni d'une étiquette qui doit être utilisée pour noter la date de préparation du produit (durée de conservation 28 jours).

**Pour effectuer cette préparation, s'installer dans une pièce ventilée (local sale).
Porter les EPI suivants : sur blouse, lunettes de protection, masque, gants.**

Fiche technique	UTILISATION OPTISAL PLUS	
Version 1	FT VIG DES 001	2/2

REVISIONS ET MODIFICATIONS :

Version 1 : Rédaction en Juillet 2021 par Préventeur des risques – Mme C. PAVILLET

Rédigé par :	Contrôlé par :	Validé par :	Approuvé par :	Date de diffusion :
IDE Hygiéniste Mme C.PAVILLET	Mme G. BAUDUIN Ingénieur Qualité	Dr N.MINGAT Président de l'EOH / CLIN	M. P. MARECHAL Directeur Général	07/2021
Visa	Visa	Visa	Visa	

POUR PRÉPARER ET UTILISER LES LINGETTES OPTISAL PLUS

PRENEZ SOIN DE VOUS, PROTÉGEZ-VOUS



H 302 : Nocif en cas d'ingestion.
H 335 : Peut irriter les voies respiratoires



H 314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.



H 400 : Très Toxique pour les organismes aquatiques.
H 411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



Gants de protection



Protection oculaire

Mettre les EPI : masque, lunettes, gants, tablier.

Si dans l'urgence une utilisation sans gant est faite : Rincez-vous les mains sous l'eau.

Si contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire (15min) et consulter un Ophtalmologiste.

Si ingestion : Ne pas faire vomir, rincer la bouche et consulter un médecin.